

Metodický pokyn k čištění a dezinfekci flexibilních endoskopů

Tento materiál je ve shodě s doporučenými postupy E. S. G. E. (European Society of Gastrointestinal Endoscopy)

Souhrn:

Tyto postupy jsou plně respektovány ve státech EU.
Cílem tohoto materiálu je přiblížit české normy normám v EU.
Doporučené postupy vznikly jako konsensus mikrobiologů, endoskopujících lékařů, sester a biomedicínských firem.

KROK	ČÍM	JAK
1.	Dezinfekční roztok s detergentem	- Propláchnout, vypnout vzduch/ vodu, sejmut bioptickou čepičku, nasadit čistící adaptér, volný konec ponořit do čistícího roztoku, zmáčknout odsávací ventil. - Zkoušku těsnosti a sejmutí ventilů a distálního kroužku provádět pod hladinou dezinfekčního prostředku.
1. Mechanická očista	Detergent	- 3x mechanicky očistit dutiny kanálků měkkým kartáčkem pod hladinou detergentu. - Ukončit vytlačáním tekutiny. - Osušit.
2. Dezinfekce	2% glutaraldehyd nebo jiný se stejným účinkem	- 5 – 7 krát propláchnout dezinfekčním prostředkem. - Ponořit na min. 10 minut.
3. Závěrečný oplach	Pitná voda	- Vypustit zbytek dezinfekce. - Propláchnout vodou. - Vypustit vodu, osušit, profouknout kanály a prosušit.
Dezinfekce v automatech		Po předchozí mechanické očištění v automatu podle doporučení výrobce.
Uchování přístrojů s optikou	Uzavřené kazety nebo skříně	Nasucho za aseptických podmínek.
Sterilizace termostabilních součástí, používaných k biopsii a dalším úkonům, porušujícím integritu kůže a sliznic.		- Fyzikální a chemická sterilizace